

NOSOFLOOR® דף נתונים טכני(PDS)

תמיסה מרוכזת לחיטוי וניקוי משטחים של מכשור רפואי

תיאור המוצר NOSOFLOOR¹ היא תמיסה מרוכזת בעלת יעילות גבוהה, המיועדת לניקוי וחיטוי יומיומי של משטחי מכשור רפואי בבתי חולים, מרפאות ומוסדות בריאות המוצר משמש לחיטוי שגרתי בחדרי ניתוח, יחידות טיפול נמרץ, סביבת המטופל ועוד

תכונות עיקריות

- פעילות רחבה: קוטל חיידקים (Bactericidal), שמרים (Yeasticidal), שחפת ומיקובקטריה
- פעילות נגד נגיפים: יעיל נגד נגיפים מעוטפים הכוללים, HBV, HIV, HCV, קורונה, הרפס ושפעת
- ניקוי וחיטוי: משלב תכונות ניקוי מצוינות יחד עם חיטוי עוצמתי באותה פעולה
- כלכלי: ריכוז שימוש נמוך מאוד (החל מ-0.25%)
- בטיחות לצידוד: אינו פוגע במכשור רפואי ואינו משאיר משקעים לאחר הייבוש
- הרכב בטוח: אינו מכיל פנולים, אלדהידים, (Formaldehyde-free) כלור או EDTA.

טבלת יעילות מיקרוביאלית

זמן מגע	ריכוז	תקן / (EN) שיטה	ספקטרום פעילות
60 דקות	0.25%	EN 13727 / EN 13624	חיידקים ושמרים (תנאי לכלוך)
30 דקות	0.5%	EN 13727 / EN 13624	חיידקים ושמרים (תנאי לכלוך)
30 דקות	0.25%	DVV / RKI	נגיפים מעוטפים (HBV, HIV, קורונה)
60 דקות	1.5%	EN 14348	שחפת / מיקובקטריה

הוראות שימוש

- הכנה: הכן את תמיסת הדילול במים (לדוגמה: 25 מ"ל לכל 10 ליטר מים ליצירת ריכוז של 0.25%)
- יישום: נגב את המשטח בעזרת מטלית לחה או מגב.
- כיסוי: ודא שהמשטח רטוב לחלוטין ושיש כיסוי מלא של כל Cavities ללא בועות אוויר
- זמן מגע: המתן את משך הזמן הנדרש לפי טבלת היעילות לעיל

5. **סיום:** שטוף היטב את המכשירים, מומלץ להשתמש במים נטולי מינרלים (Demineralised water) לשלב השטיפה הסופי

תאימות חומרים החומר תואם לרוב סוגי החומרים: פלדת אל-חלד, אלומיניום, פליז מצופה כרום, זכוכית אקרילית, פלסטיק קשיח (PVC, PE, ABS), פוליאמיד, (ולינוליאום. החומר מאושר לשימוש עבור אנדוסקופים של החברות Karl Storz ו-Pentax.

הרכב כימי (לכל 100 גרם)

- 12גרם. ethanedial
- 0.5גרם. pentanedial
- 7.5גרם. didecyldimethylammonium chloride
- מרכיבי עזר: חומרים פעילים שטח, בושם, צבע, ומעכב קורוזיה

אחסון ותקינה

- **אחסון:** יש לשמור בטמפרטורה שבין 5°C ל-25°C.
- **תקינה:** מסווג כמכשור רפואי בהתאם לדירקטיבת המכשור הרפואי EEC.93/42/